

AVARICON[®] HEMOR

KREM

Tuba, sa priloženim aplikatorom
Medicinsko sredstvo

Pre upotrebe obavezno pročitati uputstvo za upotrebu koje sadrži važne informacije za korisnika.

Sastav:

Prečišćena voda, Poloxamer 407, Macrogol 400, tečni parafin, tečni ekstrakt cveta nevena (*Calendula officinalis*), etanol, dekspantenol, suvi ekstrakt lista hamamelisa (*Hamamelis virginiana*), dinatrijum-fosfat, dodekahidrat, etarsko ulje pitome nane (*Mentha piperita*), alantoin, natrijum-hijaluronat, natrijum-dihidrogenfosfat, dihidrat, hlorheksidin-diglukonat

Oblik i sadržaj pakovanja:

AVARICON[®] HEMOR krem, 20 ml, tuba, sa priloženim aplikatorom
AVARICON[®] HEMOR krem žute do braonkaste boje sa karakterističnim mirisom.

Šta je AVARICON[®] HEMOR krema i za šta se koristi:

AVARICON[®] HEMOR krem deluje zahvaljujući hijaluronskoj kiselini, koja je u proizvodu prisutna u obliku soli, natrijum-hijaluronata. Hijaluronska kiselina je prirodni sastojak, predstavlja fiziološki, sastavni deo vezivnog tkiva. Deluje kao strukturna potpora dajući tkivu tonus i elastičnost. Hijaluronska kiselina pomaže postupku reepitelizacije i obnove tkiva.



AVARICON[®] HEMOR krem namenjen je kao pomoćna terapija za otklanjanje tegoba izazvanih spoljašnjim i unutrašnjim hemoroidima, za negu i regeneraciju kože i sluzokože analne regije, pružajući pritom prijatan osećaj hlađenja.

Upotreba AVARICON[®] HEMOR krem:

Pre i nakon upotrebe proizvoda operite ruke.

Preporučuje se upotreba 2 - 3 puta dnevno, na čistu analnu regiju. Kod tegoba izazvanih spoljašnjim hemoroidima istisnuti malo krema i naneti u tankom sloju direktno na zahvaćena mesta, poželjno nakon pražnjenja debelog creva.

Ukoliko su hemoroidi unutrašnji, aplikator treba pričvrstiti na tubu, skinuti zaštitnu kapicu i aplikovati u anus. Lagano pritiskati tubu tako da krem ravnomerno izlazi kroz bočne otvore aplikatora, a preko zahvaćenih mesta. Laganim okretanjem tube omogućava se ravnomerno razmazivanje krema.

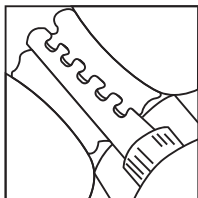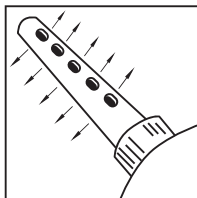

Nakon korišćenja aplikatora, aplikator oprati toplom vodom i blagom sapunicom i obrisati. Preporučuje se lična upotreba preparata.

Krem je namenjen za odrasle osobe.

Dužina upotrebe proizvoda zavisi od brzine povlačenja simptoma. Kontinuirana upotreba AVARICON® HEMOR krema ne treba da bude duža od mesec dana.

Morate se obratiti svom lekaru ukoliko simptomi potraju i nema poboljšanja.

Kada ne bi trebali koristiti AVARICON® HEMOR krem:

U slučaju preosetljivosti na neki od sastojaka proizvoda.

Interakcije sa drugim proizvodima:

Interakcije sa drugim proizvodima nisu poznate, stoga je potrebno posavetovati se sa lekarom pre upotrebe AVARICON® HEMOR krema istovremeno sa drugim medicinskim sredstvima ili lekovima za rektalnu primenu.

Neželjeni događaji:

Primena svih proizvoda za lokalnu primenu, posebno ukoliko je dugotrajna, može uzrokovati senzibilizaciju. Ukoliko se to dogodi, obratite se lekaru kako biste započeli adekvatnu terapiju. Ukoliko dođe do neželjenih reakcija koje nisu opisane u ovom uputstvu obavestite Vašeg lekara.

Upozorenja:

Držati van dometa i vidokruga dece.

Izbegavati kontaktkt sa očima. Ne gutati.

Čuvanje:








Proizvod čuvati zatvoren, zaštićen od svetlosti i toplote, na temperaturi do 25°C.

Rok upotrebe:

Naznačen na kutiji


Rok upotrebe nakon prvog otvaranja

28 dana

 LOT	Broj serije		Pre upotrebe pročitati uputstvo
	Rok upotrebe	 1304	Medicinsko sredstvo
 25°C	Maksimalna temperatura		Ovlašćeni predstavnik u Evropskoj uniji
	Proizvođač		

Datum revizije: Maj 2019

 Salus cons Kft., 6722 Szeged, Becsí krt. 23, Hungary

 Pharmanova d.o.o. Obrenovac
Industrijska 8, 11500 Obrenovac Republika Srbija

 PHARMANOVA

3203194-3